


Γρήγορος οδηγός PEGASO PLUS COMBI



1. Σύνδεση κυκλώματος ασθενούς

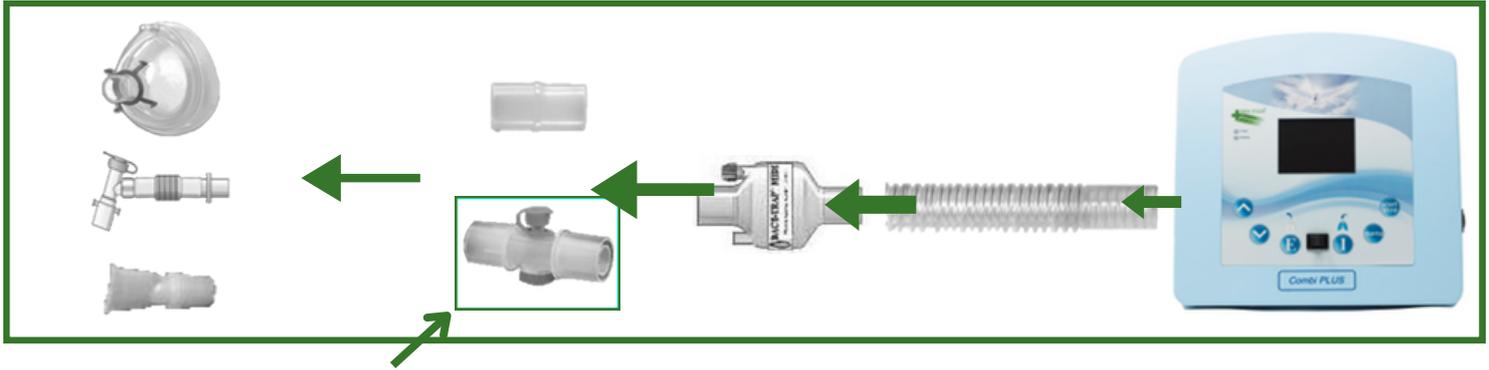

Να συμπεριλαμβάνετε πάντα τον προσαρμογέα DA-PEG-PERC όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία percussor! Το αντιβακτηριακό φίλτρο μπορεί επίσης να συνδεθεί απευθείας στη συσκευή.

2. Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του PEGASO PLUS COMBI

All modes (locked icon)	All modes can be freely modified.
All modes (unlocked icon)	All modes are locked. You can only change between the modalities.
Cough assistant (locked icon)	Only the Cough assistant modes (Manual, Automatic, EasyStart, AutoSync) are locked. You can still modify the percussor mode parameters and you can change between the various cough assistant modes without changing their parameters.
Percussor (locked icon)	Only the percussor mode is locked. You can still choose and modify freely all cough assistant modes.

Μπορείτε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τις παραμέτρους: μπορείτε να κλειδώσετε
1) μόνο τις παραμέτρους του coughassistant (Manual/Automatic/EasyStart/AutoSync),
2) μόνο τις παραμέτρους του Percussor mode ή 3) και τα δύο.


3. Εμφάνιση του ιστορικού της θεραπείας

#	DATE	TIME	LENGTH	MODE
001	14/12/2012	15:43:28	00:00:00	AUTOMATIC
002	14/12/2012	15:23:48	00:00:32	AUTOMATIC
003	14/12/2012	15:12:18	00:00:00	AUTOMATIC

4. Έναρξη και διακοπή της θεραπείας

1. Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στον ασθενή.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της εξωτερικής μονάδας τροφοδοσίας σε μια πρίζα τοίχου (100V - 240V) και ελέγξτε αν ανάβει η πράσινη λυχνία led της εξωτερικής μονάδας τροφοδοσίας. Συνδέστε την εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας στο βύσμα στο πίσω μέρος της συσκευής και πατήστε το διακόπτη στο πίσω μέρος της συσκευής.
3. Συνδέστε το αντιβακτηριακό φίλτρο στο βύσμα ροής αέρα εξόδου και το σωλήνα που είναι συνδεδεμένος με τη μάσκα (ή συνδέστε τον σε ενδοτραχειακό σωλήνα ή σωλήνα τραχειοστομίας με προσαρμογέα). Το φίλτρο μπορεί επίσης να συνδεθεί απευθείας στη συσκευή πριν από τον σωλήνα. **ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PERCUSSOR ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΞΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ DA-PEG-PERC.**
4. Ρυθμίστε τις απαιτούμενες παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου λειτουργίας, της πίεσης και των χρόνων.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές στο κύκλωμα ασθενούς.
6. Πατήστε το πλήκτρο Start/Stop για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η θεραπεία.

5. Πώς να αλλάξετε τις παραμέτρους

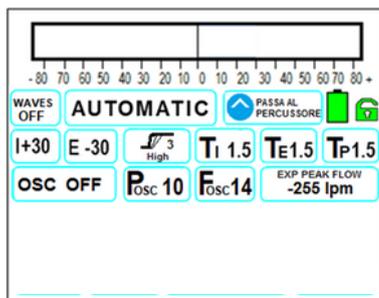

Πατώντας το πλήκτρο MENU μπορείτε να επιλέξετε την παράμετρο που θέλετε να αλλάξετε, η οποία θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν επιλεγεί. Με τα πλήκτρα UP και DOWN μπορείτε να τροποποιήσετε την παράμετρο. Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση START δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία θεραπείας, αλλά τις παραμέτρους της (εάν δεν είχε μπλοκαριστεί προηγουμένως). Όλες οι παράμετροι θεραπείας είναι ορατές και μπορούν να τροποποιηθούν από το κύριο σχήμα εργασίας.



6. Τρόποι Θεραπείας



Λειτουργίες υποβοήθησης βήχα

Για όλες τις λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν οι πιέσεις, οι χρόνοι, η άνοδος T και η ταλάντωση (on/off, πίεση, συχνότητα). Στις λειτουργίες AUTO-SYNC και EASYSTART είναι επίσης δυνατή η ρύθμιση της ευαισθησίας του Trigger  (από 1 (πιο ευαίσθητο) έως 9 (λιγότερο ευαίσθητο)). Στη χειροκίνητη λειτουργία μπορούν να ρυθμιστούν οι πιέσεις, το Rise T, η ταλάντωση και οι παράμετροι της. Οι χρόνοι αποφασίζονται αυτή τη στιγμή από έναν χειριστή με τη χρήση ενός διακόπτη ή ενός πεντάλ.


Percussor Mode

Μπορούν να ρυθμιστούν η πίεση, η συχνότητα και ο λόγος I:E.

Trainer Mode

Χρησιμοποιείται για αναπνευστικό γαστρικό κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Δείχνει σπιρομέτρηση ροής, εκπνευστική ροή αιχμής και σπιρομέτρηση όγκων.

7. Χειροκίνητη λειτουργία για την προσαρμογή ενός νέου ασθενούς

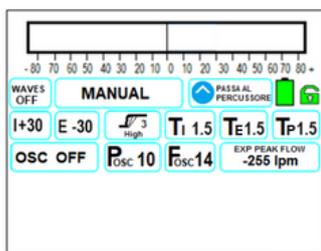

Στη **χειροκίνητη λειτουργία**, ο χειριστής αποφασίζει το χρόνο έμπνευσης, λήξης και παύσης χρησιμοποιώντας το διακόπτη της συσκευής ή ένα πεντάλ. Το Pegaso Plus Combi εμφανίζει δυναμικά τους διάφορους χρόνους. Όταν η θεραπεία σταματήσει, θα εμφανιστούν οι τελευταίοι χρόνοι. Η συσκευή σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε αυτούς τους χρόνους ή απλά να βγείτε από το μενού.



Πατήστε το πλήκτρο UP για να αποθηκεύσετε τις τελευταίες τιμές Ti, Te και Tr.

Πατήστε το πλήκτρο DOWN για έξοδο

8. Waves

Το Pegaso Plus έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει στην οθόνη τις τρέχουσες κυματομορφές πίεσης και ροής, να τις καταχωρεί στην εσωτερική μνήμη και να απεικονίζει τις τελευταίες κυματομορφές.



Waves Επιλογή

OFF: τα κύματα είναι απενεργοποιημένα και εμφανίζονται οι παράμετροι της τρέχουσας θεραπείας.

1: Οι παράμετροι εξαφανίζονται και οι τρέχουσες κυματομορφές εμφανίζονται σε χαμηλή ταχύτητα

2: Οι παράμετροι εξαφανίζονται και οι τρέχουσες κυματομορφές εμφανίζονται σε υψηλή ταχύτητα

MEM: εμφανίζει τα απομνημονευμένα κύματα.

9. Διάρκεια μπαταρίας και φόρτιση

Η μέση διάρκεια της μπαταρίας είναι 3 ώρες (σε 30hPA), ενώ η επαναφόρτιση διαρκεί έως και 8 ώρες.

10. Αλλαγή του αντιβακτηριακού φίλτρου

Τουλάχιστον κάθε μήνα πρέπει να αλλάζεται το αντιβακτηριδιακό φίλτρο.

