

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ  
ASSEMBLY METHOD OF PLASTIC PARTS



**Βήμα 1:**

Αφαιρέστε τις έξι βίδες στο πίσω μέρος της κολόνας τιμονιού

**Step 1:**

Remove the six screws on the back of the rudder



**Βήμα 2:**

Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από το τμήμα στήριξης των καλωδίων

**Step 2:**

Remove the four screws from the wire rack

**Βήμα 3:**

Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από το μπροστινό φως

**Step 3:**

Remove the four screws from the front light



**Βήμα 4:**

Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα που μπορεί να αντικατασταθεί

**Step 4:**

Remove the replaceable front cover

**Βήμα 5:**

Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να επανατοποθετήσετε το νέο πλαστικό τμήμα

**Step 5:**

Follow the same steps to reattach the new plastic part

**Βήμα 6:**

Αφαιρέστε τις τρεις βίδες στο πίσω μέρος του πλαστικού

**Step 6:**

Remove the three screws on the back of the plastic

**Βήμα 7:**

Τοποθετήστε τα νέα πλαστικά τμήματα στο επίπεδο των ποδιών

**Step 7:**

Place the new plastic parts at the level of the legs

